



隨身輕巧按摩槍
EXAGUN HYPER / REG-04TW

誠摯感謝您本次選購 DOCTORAIR 產品。

- 使用前請務必閱讀本使用說明書，俾使安全正確的操作。
- 使用說明書刊載之插圖為示意圖。

目次

- 安全上注意事項
- 各部位名稱與功能
- 充電
- 使用
- 清理保養與保存
- 有故障疑慮時
- 主要規格
- 保固及售後服務

安全上注意事項

為防範使用者或他人之危害、財產損害於未然，以下說明務必遵守之事項。
充分理解下列內容（標示、圖示記號）後，再閱讀正文，請務必遵守記載事項。

警告、注意	
將操作錯誤產生之危險及損害程度分類、說明。	
	警告 表示操作錯誤時，恐會死亡或重傷之內容。
	注意 表示操作錯誤時，恐會受到傷害或發生物質損害之內容。

圖示記號範例	
下列圖示記號說明請您遵守之內容。	
	○表示使用產品時，禁止該項行為之記號。 中間或旁邊，會以圖案或文字標示出具體禁止內容。 ○左列圖示記號表示「禁止拆解」。
	●表示使用產品時，強制遵守指示行為之記號。 ●的中間或旁邊，會以圖案或文字標示出具體的指示內容。 左列圖示記號表示「拔除電源插頭」。

警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ●本產品非醫療儀器。 ●無法表示自身意思或無法操作者，請勿使用。會受傷或發生意外事故。 ●醫師要求禁止按摩者，請勿使用。會造成症狀惡化。 ●例如：心臟疾病、急症、發熱性疾病、血壓異常、血栓（栓塞）、重度動脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎及皮膚感染（含皮下組織發炎）、頸椎病症、飲酒或服藥中者、有化學纖維過敏經驗者、健康狀態不佳者、重度疲勞者等 ●請勿使用於下列部位。 <ul style="list-style-type: none"> ・接受過整形手術的部位・皮膚下植入金屬、塑膠、矽膠等的部位・皮膚有狀況的部位/例：異位性皮膚炎、皮膚發炎、物理性刺激等引起的病理性褐斑或瘀傷、敏感性肌膚、蟹足腫體質等・發生痛覺、知覺障礙的部位・胸部、陰部、骨折部位、腹部、手肘、膝蓋、額頭、脊椎等骨頭部位、耳朵、眼球及眼睛周圍、喉嚨等脖子前方、關節部位、有結石的部位 ●使用時請勿造成身體過度負擔。會造成事故或身體不適。 ●使用於脖子周圍時，特別注意，請不要用於脖子前方。會造成事故或受傷。 ●請勿使用及存放於下列場所。會造成事故或受傷、故障。 <ul style="list-style-type: none"> ・孩童可觸及之處或寵物碰得到的地方 ・暖爐桌中或暖氣設備附近、電熱毯上等高溫場所 ・陽光直射處或車內等高溫場所 ・會潑到水的地方、高溫高溼處、落塵多的地方 ・容易受到振動或撞擊的地方 ・高電壓磁場下 ●請勿配戴飾品等硬質物品或於穿戴皮帶、圍巾等時使用。會造成事故或受傷。 ●請勿讓孩童使用、把玩本產品。會造成意外事故。 ●請勿用針之類尖銳物品或異物，插入主機充電插孔。會造成火災或觸電、故障。 ●隨附的USB線及按摩頭為本產品專用。請勿用於其他機器。


警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ●請勿讓USB線在損傷、加工、拉扯、硬折、扭曲、捆束情況下使用。另外，請勿在線上放置重物或讓線被夾住。會造成火災或觸電。 ●請勿讓USB線纏繞住主機等。 ●斷線會引起火災或觸電。 ●本產品內建充電鋰電池。請絕對不要做出下列行為。 <ul style="list-style-type: none"> ・加熱或投入火中 ・在高溫環境下使用、充電、放置 ・放在暖爐桌或棉被中使用、充電 ・用毯子等蓋住，使用、充電 ・在日光直射處或大熱天的車內等高溫場所使用、充電 ●請勿使用性能已弱化的充電鋰電池。勉強使用性能劣化的充電鋰電池，恐有發生重大事故之虞。電池性能劣化或感覺異常時*，請停止使用，洽詢DOCTORAIR顧客諮詢窗口。 *可用時間變短、無法充電等
	<ul style="list-style-type: none"> ●下列人士，請務必洽詢醫師後，再行使用。 <ul style="list-style-type: none"> ・使用心律調節器等易受電磁干擾的體內植入型醫療用電子儀器者 ・惡性腫瘤病患 ・心臟病患 ・重度血液循環障礙者 ・孕期或可能懷孕者、剛分娩者 ・糖尿病等高度末梢循環障礙引發之知覺障礙者 ・高血壓患者、容易瘀青者 ・需要安靜者或體力衰弱者 ・體溫38℃以上（發燒期）者 ●例：急性發炎症狀（倦怠感、惡寒、血壓變動等）強烈期或衰弱時 ・骨質疏鬆症、脊椎骨折、扭傷、肌肉拉傷等急性（疼痛性）患者 ・腱鞘炎、鞭抽式損傷、頸椎損傷、脊椎管狹窄症、椎間盤突出、腰痛、坐骨神經痛等整形外科患者 ・脊柱異常者 ・正在接受醫師治療者 ・上述以外感到身體異常者
	<ul style="list-style-type: none"> ●首次使用者、或長時間未使用者、高齡者等，剛開始請勿長時間使用，請等身體逐漸習慣後再使用較長時間。 ●請用指定電源、電壓充電。使用市售充電器或USB線時，請先確認規格，務必使用指定品。使用錯誤電源、電壓，會造成火災、燒燙傷、觸電等。另，錯誤使用衍生充電器等故障，敝公司概不負責。 ●以市售充電器充電時，請確認充電器有無損傷，絕對不要使用異常的充電器。又，請也請一併閱讀所使用充電器的使用說明書後，正確使用。 ●從寒冷的地方移動到溫暖的地方、室溫剛急遽上升，內部可能會結露。結露仍持續使用，會造成故障，因此，溫度變化大的時候，請先放置1小時左右，再開啟電源。 ●使用中出現暈眩或噁心、疼痛、皮膚起疹子等，身體出現異常或感覺異常時，請立即停止使用。不適感持續時，請向醫師諮詢。會造成事故或身體不適。 ●使用前，請務必確認主機或隨附按摩頭等是有無破損或異常。發現破損或異常時，請不要使用，洽詢DOCTORAIR顧客諮詢窗口。

警告	
	<ul style="list-style-type: none"> ●USB線損傷、無法插緊充電器等時，請立即停止充電，更換新的USB線。又，無法插緊主機時，也請停止充電，洽詢DOCTORAIR顧客諮詢窗口。繼續充電，會造成火災或觸電。 ●本產品若發出異音或臭味、冒煙，請立即關閉電源，洽詢DOCTORAIR顧客諮詢窗口。繼續使用，會造成火災或觸電、事故。
	●請不要用沾溼的手碰觸主機。會造成觸電或故障
	●本產品非防水型，請勿在浴室等處使用。會因漏電造成觸電或走火。
	<ul style="list-style-type: none"> ●請絕對不要拆解、改造本產品。會造成觸電或受傷。 ●更換內建的充電電池伴隨危險，請絕對不要執行。

注意	
	<ul style="list-style-type: none"> ●請勿用於用途以外之目的。會造成受傷或身體不適。 ●請勿與其他器具、機器等同時使用。會造成事故或受傷、身體不適。 ●請不要丟擲、摔落、以重物重壓、強烈撞擊本產品。會造成火災或觸電、故障。 ●使用時，請不要強壓等，對身體或主機施加負荷。 ●使用中請勿睡著。會造成事故或受傷。 ●飲酒時或飲酒後，請勿使用。會造成事故或受傷。 ●使用中請不要執行其他作業。會造成事故或受傷。 ●不可用於醫療行為。 ●將USB線從充電器拔除時，請不要拉住USB線。會導致絕緣不良，造成火災、觸電、短路，引發走火。
	<ul style="list-style-type: none"> ●連續使用時，請設定每次10分鐘。也請不要長時間使用於同一處。會造成反效果或受傷。 ●用餐後，請間隔足夠時間後再行使用。會造成身體不適。 ●不使用時，請關閉電源。溼氣、落塵等，會導致絕緣不良，造成火災或漏電。另外，長時間不使用時，請放進袋子等保管，勿使髒污或落塵等附著。 ●使用中請注意，不要讓手指夾在主機和按摩頭之間、也不要讓頭髮捲入。 ●使用延長線充電時，請務必遵守插座的額定電容。會造成火災或故障。 ●請定期清理保養主機及USB線。尤其是USB線插頭，若灰塵附著，會造成火災或連接器燒毀、接觸不良。 ●清理保養，請務必在關閉電源的狀態下執行。會造成觸電或事故。 ●充電一結束，請將USB線從主機及充電器等處拔除。 ●開始打雷時，請立即停止充電。落雷會造成火災或觸電。 ●直接用在皮膚上時，請不要使用基礎化妝品或油、乳霜等，務必用於裸膚上。 ●按摩頭運作時，可能會與皮膚產生磨擦。磨擦較強時，請墊上浴巾等再行使用。

各部位名稱與功能

主機

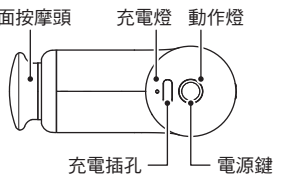

平面按摩頭（振動部）

靠在身體想按摩的部分。或安裝隨附的按摩頭後使用。

電源鍵

長按約1.5秒以上，即可開/關電源。電源關閉的狀態下，每短按一次，振動模式會依下列順序切換。
模式1（電源開啟）→振動模式2→振動模式3→振動模式4→振動模式1

充電插孔

充電時連接USB線。

動作燈

亮燈顏色，表示選用中的振動模式。
模式1：閃藍燈（慢）
模式2：閃綠燈（慢）
模式3：閃紅燈（慢）
模式4：閃黃燈（慢）
※電源關閉時燈號熄滅。

頭/按摩頭



平面按摩頭（無法拆裝）

可安裝按摩頭。
※平面按摩頭可直接使用。



軟刷毛按摩頭

選擇振動模式4（臉部模式）時使用。
※用於臉部時，請務必使用軟刷毛按摩頭。



錐形按摩頭

用於腳底等處。



U型按摩頭

用於手臂、小腿肚等處。

配件



USB線




使用說明書
（本書）

充電

初次使用或長時間未使用時，請依照下列順序充電後再行使用。另外，請依照需求，定期充電。

- 請注意**

- 使用前，請確認主機有無損傷。發現異常時，請不要使用，洽詢DOCTORAIR顧客諮詢窗口。
- 請勿在USB線捆束的狀態下使用。
- 可使用市售USB線。使用市售品時，請務必使用裝配「56 Ω resistor（電阻器）」的USB Type-A to C線。
- 運作中無法充電。運作中充電，將自動停止運作，開始充電。
- 錯誤使用衍生的充電器等故障，敝公司概不負責。

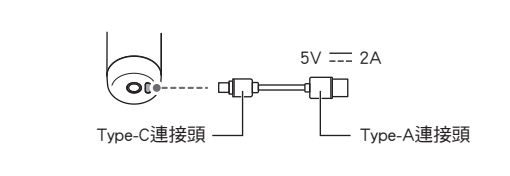

- 將USB線Type-C連接頭，連接到主機的充電插孔。請確實插到底。

- 將USB線Type-A連接頭，接上充電器USB埠後，將電源插頭，確實插進家用插座，插到底。開始充電，充電燈即亮起紅色燈。充電燈亮綠色燈，表示充電完成。

- 請注意**

- 使用市售USB充電器時，建議使用額定輸出DC5V 2A以上的充電器。
- 請確認所使用的充電器有無損傷，請絕對不要使用有異常的充電器。也請一併閱讀所使用充電器的使用說明書後，正確使用。

- 3** 充電完成後，請將USB線從主機及充電機器兩者拔除。

使用

本產品備有四段振動模式、3種安裝在平面按摩頭上的按摩頭。請選擇符合自身的模式及按摩頭。

- 請注意**

使用前

- 使用前，請確認電源鍵或定時器正常動作。
- 第一次使用前須充電。詳情請見「充電」。
- 使用中請注意，不要讓手指夾在主機和按摩頭間、也不要讓頭髮捲入。

- 1** 在平面按摩頭裝上想用的按摩頭（也可直接使用）。

- 長按電源鍵（約1.5秒），開啟電源。電源一開啟，即以振動模式1開始振動。

- 短按電源鍵，調整振動模式。每按一次功能鍵，會依振動模式1（弱）→振動模式2（中）→振動模式3（強）→振動模式4（臉部模式）→振動模式1…循環切換。動作燈顏色，會配合振動模式改變。

- 將本產品靠在想使用的身體部位。請握緊握把，將本產品輕靠在大腿或小腿肚、肩或手臂等想使用的部位，以緩慢划過的移動方式使用。

- 請注意**

- 使用在臉部時，請務必安裝軟刷毛按摩頭、使用振動模式4（臉部模式）。
- 請勿使用在額頭等骨頭部位、眼球、眼睛周圍、耳朵、喉嚨等脖子前方、骨折或動過外科手術的部位，以及體內植入金屬或矽膠、塑膠的部位。
- 請以3分鐘內全臉使用完畢為目標。

- 請注意**

- 按摩頭太用力壓在身體上等，對振動部分持續施以負荷（約3秒），會因安全考量自動停止振動。振動停止後，約10秒內短按電源鍵，即會以原先的振動模式重新運作（定時器不會重設）。
- 振動停止後，約經過10秒，電源會完全關閉。要再次使用時，請重新長按電源鍵，開啟電源。
- 用於裸膚上時，請不要使用基礎化妝品、油、乳霜等。

- 電源開啟約經過10分鐘，會自動停止振動，關閉電源。中途切換振動模式，定時器不會重設。

- 請注意**

- 使用中想停止振動時請長按電源鍵，直到振動停止。

清理保養與保存

清理保養

- 請注意**
- 清理保養前，請務必關閉電源。
- 請勿使用稀釋劑、揮發油、酒精等溶劑或化學藥品、熱水。會造成故障或零件破損、變色等。

主機和按摩頭，請用乾燥柔軟的布，將髒污拭除。髒污嚴重時，請用沾水後擰乾的海綿或軟布擦拭。之後，請再用乾布乾擦。

保存

- 保存時，請務必關閉電源。
- 請詳加拭除髒污或灰塵，避免保存於浴室等用水場所或溼氣高的場所、日光直射處。
- 請勿保存於嬰幼兒或幼小孩童可觸及處，或寵物會碰觸到的場所。
- 長時間保存時，請放入袋子等保存，以防髒污或灰塵附著。
- USB線有扭轉情況時，請拉直後再行保存。

丟棄時

主機內建充電鋰電池。丟棄時，請依照居住地區的地方政府條例處理。條例詳細內容，請洽各地方政府。按摩頭或USB線等其他配件，也請遵照居住地區地方政府的廢棄物分類處理。

有故障疑慮時

症狀	確認事項
開啟電源仍不振動	<ul style="list-style-type: none">充電中，即使長按電源鍵也不運作。請停止充電再使用。 可能是充電不足。請再次充電。
振動很弱	可能是充電不足。請再次充電。

無法充電、充電後，電池續航時間短	<ul style="list-style-type: none">周圍極端低溫或極端高溫時，可能無法正常運作。請在周圍溫度0℃～40℃的環境下充電。 第一次充電或長時間未使用後充電，電池續航時間可能偏短。 用市售充電器充電時，請確認是否符合建議的配接器規格。建議配接器：額定輸出DC5V 2A以上 使用配件以外的USB線時，可能因供電功能不足等導致無法充電，或充到滿電需耗費較長時間。請更換其他USB線試試。 因充電器與USB線規格不同，可能有無法充電的情況。請更換USB線或充電器、改變充電方法試試。
------------------	--

症狀	確認事項
突然停止	<ul style="list-style-type: none">本產品開啟電源經過約10分鐘，會自動停止振動、關閉電源。 可能是充電電池電力耗盡。請再次充電。 將按摩頭強壓在身體上，會因安全考量停止運作。靠在身體上時，請勿強壓。
有異音	本產品在結構上，會發生某種程度的動作音。非屬異常。

上述無法解決時，請洽DOCTORAIR顧客諮詢窗口。

主要規格

產品名稱	隨身輕巧按摩槍
型號	REG-04TW
電源	充電式（內建充電式鋰電池7.4V 1300mAh）
充電時間*1	約2小時（電力完全充滿，使用DC5V 2A輸出配接器時）
可充電次數*1	約300次
振動次數*1	模式1：約2000次/分 <p>模式2：約2500次/分</p> <p>模式3：約3000次/分</p> <p>模式4：約650次/分（臉部模式）</p>
定時器	約10分鐘
使用環境溫度	0℃～40℃
外型尺寸	約寬88.2×高128×深35mm（僅主機）
重量	約220公克（僅主機）
材質	主機：ABS、鋁 <p>按摩頭：矽膠</p>
附件	按摩頭×3種、USB線（Type-C）、保證書、使用說明書
生產國	中國
對應充電器*2	額定輸出：建議DC5V 2A以上

*1 實際時間及次數，因使用環境或使用狀況而異。以敝公司建議之使用方法為準。

*2 未附充電器。請使用市售USB充電器。

保固及售後服務

使用方法、清理保養、修理等諮詢，請洽原購店家。

保證書

請於購買時，確認填寫「購買日期」、「銷售店名」欄位。另外，請詳閱內容，妥善保管。

報修時

請先確認「有故障疑慮時」。無法修復時、或相同症狀再三發生時，請關閉電源，通知原購店家下列內容。

- 購買日期
- 產品型號：REG-04TW
- 故障狀況（盡可能具體描述）

保固期限

依保證書規定維修。另外，保固期內仍有些情況需付費，請詳閱保證書。

保固期間：記載於保證書

- 保固期結束後** 診斷後若可修理時，依顧客需要，付費修理。修理費用由以下內容組成。

- 技術費：診斷、修理、調整、檢查等費用
- 零件費：修理所用零件及輔助材料費
- 維修品運費：維修品往返的運費

- 有其他不清楚的部分** 售後服務相關諮詢及不清楚的部分，請洽原購店家或DOCTORAIR顧客諮詢窗口。

請為使用多年的隨身輕巧按摩槍做檢查		
關懷檢查	<input type="checkbox"/> 有無這樣的症狀？	<input type="checkbox"/> 停止使用
	<ul style="list-style-type: none">●冒煙、異味、異音●一動USB線，時而通電時而斷電●內部有異物或水侵入●主機變形或破損●其他異常	為防止故障或事故，請關閉電源，務必洽詢原購店家或DOCTORAIR顧客諮詢窗口檢查、修理相關事宜。